

CollaStat

Bioaktif Hemostat Matris



Hızlı ve Kolay Hazırlama
Trombin sulandırma prosedürü gerektirmez



Hızlı ve Etkili Hemostaz
Aktif kanamanın 1-5 dakika içinde kontrol edilmesini sağlar

CollaStat

Ürün İçeriği ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar




- Karıştırdıktan sonra 30 saniye bekleyiniz.
- Kan damarları içerisine enjekte etmeyiniz.
- Eğer kanama durduysa, CollaStat dikkatli bir şekilde uygulama bölgesinden uzaklaştırılır.

Saklama koşulları: 2 - 25°C


Raf ömrü: Üretim tarihi itibarıyla 2 yıl

- Ürün $\pm 2,500$ IU trombin içermektedir.
- 6 hafta içinde resorbe olur.
- Ürün hazırlandıktan sonra 8 saate kadar kullanılabilir.


Ürün Uygulama Adımları

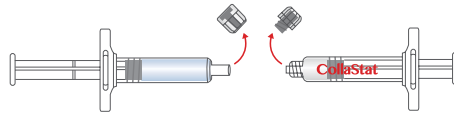

1 Kapakları çıkartınız

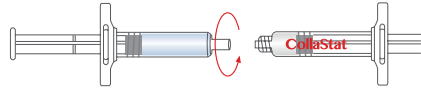


2 Şırıngaları birbirine bağlayınız

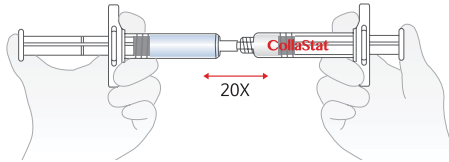

3 Karıştırınız



4 Uygulama başlığını takınız

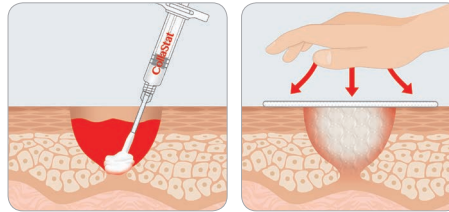

5 Uyguladıktan sonra baskı uygulayınız



Genel Merkez ve Marmara Bölge Satış Şubesi:
Ünalan Mahallesi, Çağla Sokak,
Çamlıca İş Merkezi, B Blok, No:11,
Üsküdar 34700 İstanbul
T: 0216 285 05 00
E: info@kocmedical.com



Anadolu Bölge Satış Şubesi:
Cevizlidere Mah. 1244. Sk.
Menekşe Apt. No: 2/B-D
Çankaya 06520 Ankara
T: 0312 287 70 70
F: 0312 287 06 70
E: ankara@kocmedical.com

Ege Bölge Satış Şubesi:
Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad.
Avcılar Cadde Teras Sitesi 367/4 Sk.
No:4H Bornova 35100 İzmir
T: 0232 472 04 05
F: 0232 472 03 04
E: izmir@kocmedical.com



Çukurova Bölge Satış Şubesi:
Gürselpaşa Mah. Şehit Polis Şahin
Polat Aydın Cad. No:1 İç Kapı No:53
Seyhan 01360 Adana
T: 0322 248 97 90
F: 0322 248 89 71
E: adana@kocmedical.com